

**GEBRUIKSAANWIJZING**  
**BRANCARD**



***HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.***  
***NIJVERHEIDSWEG 21***

***POSTBUS 827***

***3160 AA RHOON***

***010 - 5018000***

***010 – 5013843***

***[www.vlierodam.nl](http://www.vlierodam.nl)***




HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL

Phone +31 10 5018000

[www.vlierodam.nl](http://www.vlierodam.nl)

### Gebruiksaanwijzing Brancard:

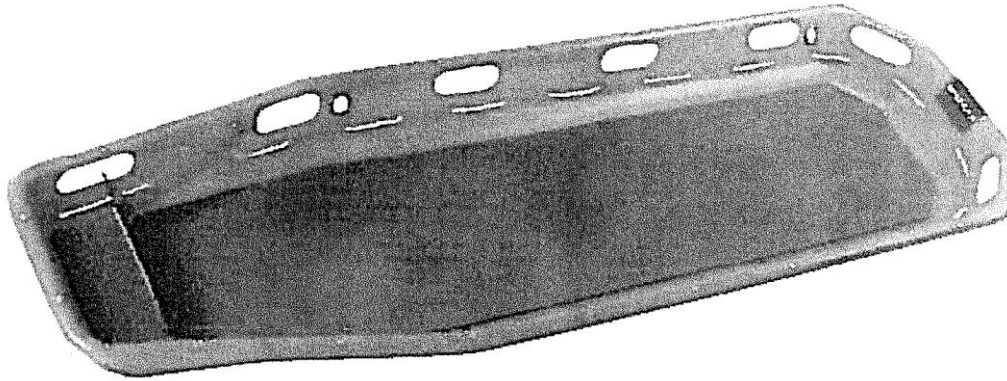


De brancards zijn hulpmiddelen bestemd voor het ophalen/opbergen en het transport van patiënten. Ze zijn bruikbaar voor hulpoperaties in al die gevallen waarin het noodzakelijk is de patiënt te beschermen tegen laterale botsingen en het niet mogelijk is om met gewone transporthulpmiddelen te werken. Het is niet voorzien dat de patiënt zou meewerken tijdens het transport.

Vooraleer het toestel te transporteren, verzeker u ervan het goed te hebben ingepakt zodat het geen risico zou lopen op botsing of val tijdens hetzelfde transport. Gelieve geen zwaar materiaal op de brancard te plaatsen tijdens zijn opslag, en gebruik de brancard zeker niet als steunvlak voor geen enkel type materiaal. De opslag van het toestel moet plaatsvinden in droge plaatsen waar geen vochtigheid is.

Voor gebruik dient men de na te kijken of alles goed is gemonteerd.

Bij het eerste gebruik dienen de veiligheidsriemen gemonteerd te worden door ze aan de omtrekkoord vast te knopen zoals hieronder wordt aangegeven.

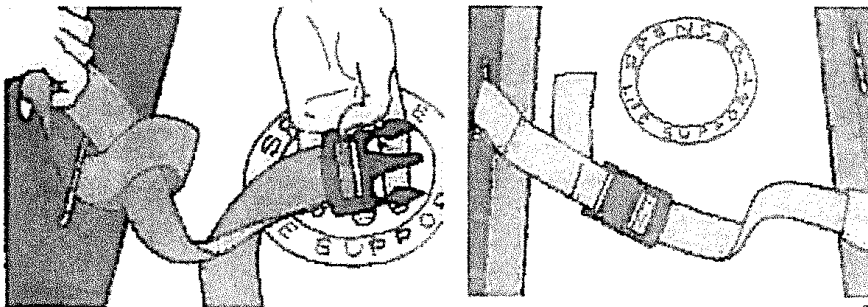

Vooraleer de brancard in gebruik te stellen, gelieve eerst de volgende punten na te gaan:

- Is de omtrekkoord voldoende strak?
- Zijn de veiligheidsriemen geïnstalleerd voor de immobilisatie van de patiënt?
- Is de voetsteun aanwezig?

Indien alles in orde is, dan is de brancard klaar voor gebruik.

Is dit niet het geval dan dient de brancard buiten gebruik te worden geplaatst.

Hoe de patiënt in de brancard te plaatsen:

- Plaats de brancard zo dicht mogelijk aan de patiënt vooraleer hem/haar in de brancard te plaatsen.
- Laad de getraumatiseerde patiënt met de voorziene, en indien nodig geachte immobilisatie systemen: wervelplanken of vacuüm matras of andere.



HANDELMAATSCHAPPIJ VLIERODAM B.V.

Nijverheidsweg 21 , 3160 AA Rhoon NL

Phone +31 10 5018000

[www.vliero dam.nl](http://www.vliero dam.nl)

#### Plaatsing van de voetsteun:

- Plaats de voetsteun op bruikbare hoogte zodat de oppervlakte in contact zou komen met de voeten van de patiënt om zo longitudinale verplaatsingen te vermijden, door de haken aan het uiteinde van de riem in te voeren, in overeenkomst met de handvaten van de brancard.
- Verzeker u ervan dat de voetsteun correct gecentreerd is op de riemen, zodat het loodrecht t.o.v. het vlakke eind van de brancard staat.

#### Brancard opheffen met patiënt:

- Fixeer de patiënt aan de brancard met de 3 riemen ter beschikking
- Ga na of dat de riemen niet te strak zijn
- Positionering van de hulpverleners aan de uiteinden van de brancard (één t.h.v. de voeten en de andere aan het hoofd)
- Door de aangepaste heftechniek te gebruiken, om ergonomisch te werk te gaan, moeten de hulpverleners de daarvoor bestemde handvaten vastnemen aan de uiteinde van de brancard, en dan opheffen.

#### Laden van de brancard in ziekenwagen of ander specifieke wagen:

- Plaats de brancard in de voorziene plaats.
- Zet de brancard vast d.m.v. de daarvoor eventueel aanwezige fixatiesystemen

#### Uitladen van de brancard uit de ziekenwagen of ander specifieke wagen:

- Maak de brancard vrij van eventuele fixatiesystemen
- Neem de brancard vast via de daarvoor bestemde handvaten en neem hem uit de wagen.


#### Transport op aflopende oppervlakten of hellingen:

- Plaats de voetsteun op bruikbare hoogte om zo te vermijden dat de patiënt zou bewegen/verplaatsen
- Indien de patiënt letsel zou hebben aan de onderste ledematen, immobiliseer deze ledematen dan met geschikte hulpmiddelen en plaats de brancard nooit in verticale positie
- Verzeker de brancard met een statisch veiligheidssysteem vooraleer hem op te heffen of neer te leggen
- Blijf steeds bij de patiënt tijdens de manoeuvres

#### Schoonmaak:

Maak de blootgestelde delen schoon m.b.v. een ingezepte spons, gebruik wel een zachte zeep. Vervolgens goed droog maken. Het matras aan de binnenkant van de brancard kan worden schoongemaakt m.b.v. water en zeep en kan worden ontsmet met een gewoon ontsmettingsmiddel.

Indien de brancard niet zou worden schoongemaakt, dan is er risico op kruisbesmetting door de aanwezigheid van secreties en/of restmateriaal op het oppervlak van de brancard.

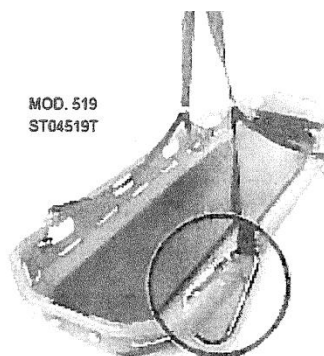

Bevestiging hijspin